

# LISTA DE VERIFICACIÓN

Saque los artículos siguientes de la caja del X-PLOR® para comenzar:



Unidad del X-PLOR



Bolsa de transporte



Cartucho reemplazable  
(dentro de la bolsa de Mylar)



Cánula nasal



Fuente de alimentación para CA



Fuente de alimentación para CC



Asa  
(se acopla a la bolsa de transporte)



Correa de hombro  
(se acopla a la bolsa de transporte)



Batería de 8 celdas



## VIAJE CON EL X-PLOR

El X-PLOR le permite viajar con facilidad. ¡Es perfecto para llevarlo en autobuses, trenes y cruceros! Ahora, con el oxígeno complementario del X-PLOR y las baterías de carga directa, explorar nunca ha sido tan fácil.

**X-PLOR CUMPLE CON LAS NORMATIVAS DE LA FAA.**



[XPLORoxxygen.com](https://www.xploroxxygen.com) | (877)-GO-XPLOR

©2022 Belluscura LLC. Todos los derechos reservados.



## GUÍA DE INICIO rápido

 belluscura® | [XPLORoxxygen.com](https://www.xploroxxygen.com)


# GUÍA DE INICIO

## rápido



### RETIRE LA TAPA PROTECTORA E INSERTE EL CARTUCHO

- Saque el cartucho de la bolsa de Mylar.
- Retire la tapa protectora del cartucho.
- A continuación, inserte completamente el cartucho en la unidad para que el asa quede al ras.

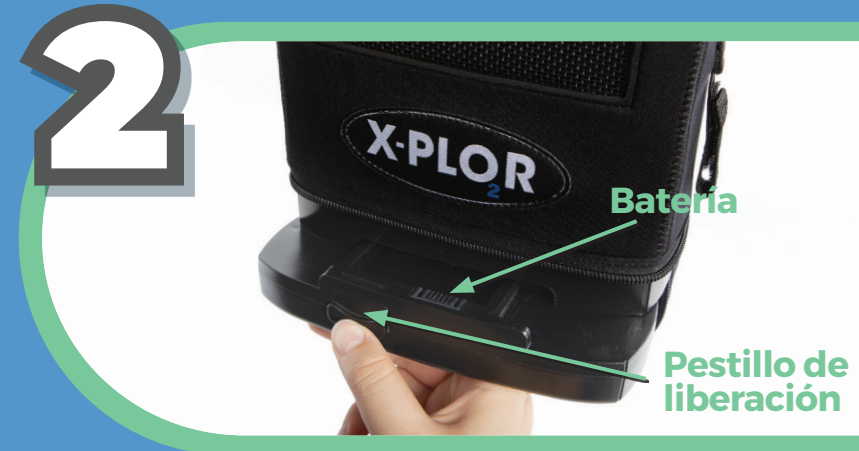

### UBIQUE LA BATERÍA

- Inserte el X-PLOR en la bolsa de transporte. Una vez que el X-PLOR se haya insertado correctamente en la bolsa, se verá la pantalla LCD a través de la ventana de plástico y la entrada y salida de aire quedan alineadas con los paneles de malla.
- Para fijar la batería, deslícela hasta que el pestillo esté en la posición de cerrado y cierre la bolsa.
- Para desconectarla, simplemente presione el pestillo de liberación para desbloquear la batería y deslícela hacia usted.



### CARGUE LA BATERÍA

- Coloque el aparato en un área bien ventilada para cargar totalmente la batería antes de usar su X-PLOR, el cual puede tardar hasta 6 horas en cargarse con la batería de 8 celdas.
- Para cargar, inserte el conector de alimentación de CA en la entrada de la batería y enchufe el otro extremo en un tomacorriente.




### ENCIENDA Y CONFIGURE EL FLUJO DE OXÍGENO

- Pulse el botón de ENCENDIDO durante 2 segundos para encender su X-PLOR.
- Una vez encendida, coloque la unidad en posición vertical para el calentamiento (esto dura menos de 2 minutos).
- Use las FLECHAS ARRIBA/ABAJO para ajustar el nivel de flujo de oxígeno que le hayan prescrito.



### CÁNULA NASAL

- En la caja se incluye una cánula nasal. Las cánulas adicionales deben comprarse por separado.
- Conecte la cánula nasal a la boquilla de salida de oxígeno que se encuentra en la parte superior del X-PLOR.
- Colóquese el otro extremo en las fosas nasales. El oxígeno se suministrará por la cánula nasal con cada respiración.
- Recuerde respirar normalmente por la nariz.

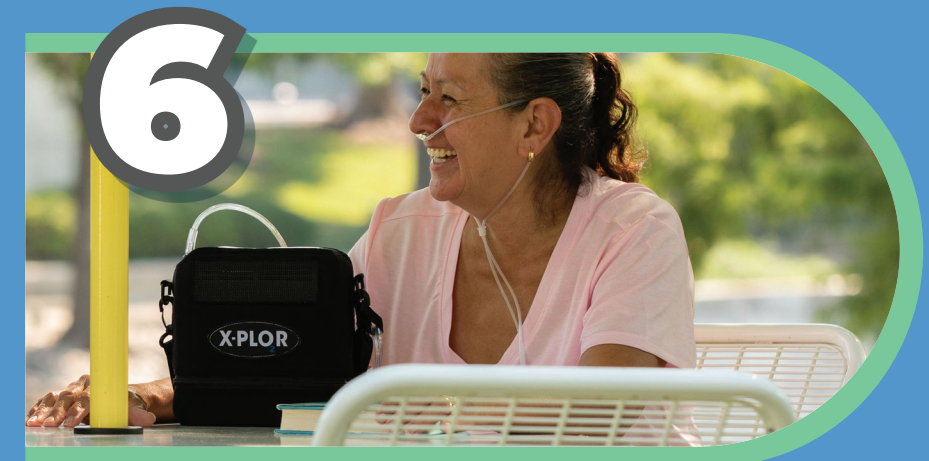

### ¡SALGA CON SU X-PLOR!

- Coloque la correa y el asa en su X-PLOR y disfrute su nueva movilidad.

**VIVA LA VIDA.  
RESPIRE CON FACILIDAD.  
SALGA CON SU X-PLOR.**